



# MÁSCARA DESCARTÁVEL



**ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA**

**TESTADA NO BRASIL**




As máscaras descartáveis BYD possuem três camadas de proteção e capacidade de filtragem atestada de **99,2%** contra gotículas e partículas virais, auxiliando na proteção contra a transferência de microorganismos, fluídos corporais e material particulado.

## Parâmetros da máscara descartável BYD

| Nome                                         | Parâmetro                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto                              | Máscara descartável                                                                                                                                                                         |
| Material                                     | Tecido não tecido de polipropileno; tecido não tecido com filtro de polipropileno; clipe de nariz de metal com revestimento plástico; elásticos de orelha de elastano, poliéster e/ou nylon |
| Modelo do produto                            | FE2111                                                                                                                                                                                      |
| Tamanho                                      | 175 mmx95 mm                                                                                                                                                                                |
| Data de validade                             | Dois anos após a data de fabricação                                                                                                                                                         |
| Especificação de embalagem                   | 50 unidades/caixa                                                                                                                                                                           |
| Armazenamento                                | Armazene em local seco e arejado e em temperatura ambiente                                                                                                                                  |
| Capacidade de filtragem bacteriológica (BFE) | 99,2%                                                                                                                                                                                       |

## Apresentação do produto

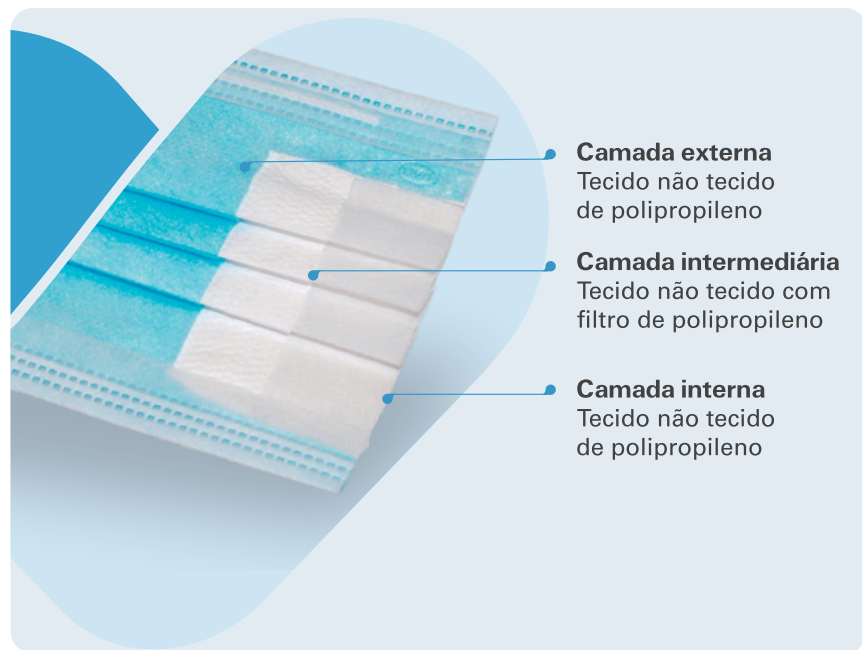

## Instruções de uso



**1.** Segure a máscara pelos elásticos das orelhas com o lado colorido voltado para fora e o clipe nasal para cima e coloque um elástico em volta de cada orelha.



**2.** Ajuste o clipe plástico do nariz de acordo com a forma do nariz para impedir a entrada de ar não filtrado.



**3.** Puxe a máscara sob o queixo para garantir a máxima vedação.

## Instruções de descarte consciente

1. Higienize suas mãos com água e sabão ou álcool em gel e remova a máscara através dos elásticos laterais.
2. Dobre a máscara com o lado interno voltado para fora.
3. Dobre novamente a máscara e enrole-a com os elásticos laterais.
4. Coloque a máscara dobrada em uma sacola plástica e descarte em uma lixeira apropriada com tampa.
5. Higienize novamente suas mãos com água e sabão ou álcool em gel.

## ATENÇÃO

1. Consulte as instruções de uso antes de utilizar.
2. Utilize apenas dentro do período de validade.
3. NÃO utilize se a embalagem estiver danificada.
4. Uso adulto.
5. Utilize este produto imediatamente após a abertura da embalagem. Não toque na parte interna da máscara.
6. Não lavável.
7. Uso único. Descarte de acordo com as instruções de descarte consciente.

Todas as informações apresentadas neste documento são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da impressão.

A BYD se reserva o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.

Produto importado.

Fábrica BYD do Brasil  
Avenida Antonio Buscato, 230 - Campinas / São Paulo  
Brasil | CEP 13069-119 | Tel: +55 19 3514-2550

 (11) 9 4232 4368  
(11) 9 7288 9790  
vendas@byd.com  
SAC: (19) 3514-2550  
WWW.BYDBRASIL.CARE

